

BRILLICA

Lipply

Oral Protection sheet

リップリー (口唇・口腔シート化粧品)



オフィスホワイトニングの
未来を変える。

リップリーでワンランク上の心地よい処置体験を。

 株式会社東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

オフィスホワイトニング中の口腔内外に潤いを与える口もとと専用シートマスク。

オリジナル形状のシートと高保湿エッセンスで口唇や粘膜を

あらゆるトラブルから守り、みずみずしい口もとへ。



こだわりの極厚シート

研究を重ね、口腔内外に密着する世界初*1のシート形状を開発。角層への浸透をサポートする3層構造の贅沢シート*2を採用。

*1 特許出願中 *2 一般的なシートマスクと比較



うるおいのベール

11種類*3の高保湿エッセンスが角層に浸透。とろみのあるテクスチャーで、乾燥や刺激から保護。香料、甘味料、アルコールフリー。


*3 ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス、白金 など




安心して快適な処置体験

オフィスホワイトニング中のあらゆるトラブルを未然に防ぐ。口唇や粘膜を覆い、薬剤によるバーニングのリスク回避や開口器装着中の不快感を軽減。安心の日本製。


How to use

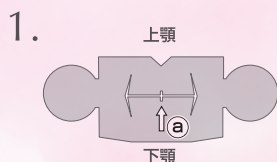

シートを袋から取り出します。余剰な液を絞ります。①の切れ込み部付近で、片側が一部上下に繋がっているのを認めます。②の切れ込みを正中に合わせます。(シートに表裏はありません。)

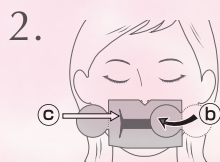

左右 ①のシート部を合折りし、それぞれ ②の切れ込み部から口腔内に入れます。③のシート部を頬粘膜に密着させます。

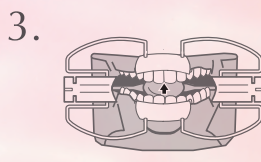

開口器を装着します。開口器中心部の矢印を上顎に向け、口角から装着します。シートを巻き込みながら、上下の口唇に装着します。歯面にシートがかからないよう、ピンセットなどで調整してください。



各種オフィスホワイトニング薬剤の使用方法に沿って、処置を行ってください。

詳しい使用方法は動画をご覧ください




製品仕様



リップリー (口唇・口腔シート化粧品)

内容量: 1箱10枚入 定価: 3,000円(税別)
成分: 水、プロパンジオール、グリセリン、マルチトール、グリコシルトレハロース、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス、プルラン、加水分解水添デンプン、トレハロース、白金、BG、PEG-60水添ヒマシ油、ポリソルベート80、キサンタンガム、アルギン酸Na、クエン酸、クエン酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン、フェノキシエタノール
B600/04582539071325
Made in Japan

関連製品

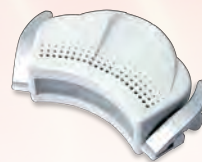

プリリカ ビアンコ (開口器装着型 LEDホワイトニングライト)

寸法: (本体)W141×D85×H43mm 質量: 約100g
電源: リチウムイオンバッテリー
充電器定格 50/60Hz: 単相100V 0.3A
光源: φ3 LED×90個 発光波長域: 400~480nm
照射エリア: W70×H25mm
医療機器届出番号: 14B2X00036000008
(一般医療機器 特定保守管理医療機器)
一般的名称: 歯面漂白用加熱装置 販売名: プリリカ ビアンコ A254 / 04560200854149
Made in Japan

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

お問い合わせ

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13
【仙台営業所】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4
【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市 名東区 香坂 1001
【大阪営業所】〒564-0063 大阪府 吹田市 江坂町 2-6-19 竹が江B5
【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7
【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37
【物流センター】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-43-17

tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445
(ISO9001 ISO13485 認証工場)



■性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用前に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。